

Країна виробник: Швейцарія
Завод виробник: Тайвань
Гарантія 2 роки. Безкоштовне сервісне обслуговування 10 років

gamma-farm.com.ua

Використовувати тільки
з тест-смужками
GAMMA MS



ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

1 Вставте тест-смужку у вимкнений прилад.

Дочекайтесь появи на екрані символу "▾".




2 Нанесіть пробу.

Піднесіть крапельку крові до торця тест-смужки
в забірний отвір.


Кров всмоктується в забірний отвір.

Після того, як контрольне віконце заповнюється повністю,
прилад починає вимір.

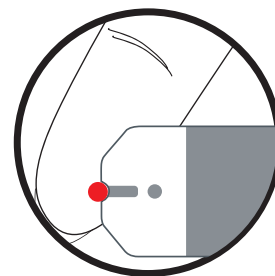

3 Через 5 секунд на екрані

з'явиться результат
(Наприклад 5,7 ммоль / л),
який заноситься
в пам'ять автоматично.

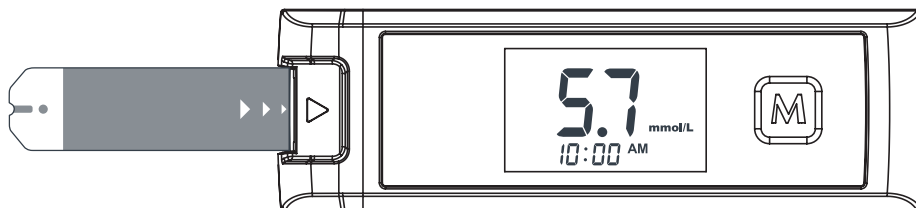

4 Вийміть використану тест-смужку

Після видалення тест-смужки глюкометр відключається автоматично.

! Глюкометр GAMMA MINI для проведення аналізу можна не налаштовувати.