

Країна виробник: Швейцарія
Завод виробник: Тайвань
Гарантія 2 роки. Безкоштовне сервісне обслуговування 10 років




gamma-farm.com.ua

Використовувати тільки
з тест-смужками
GAMMA DM



НАЛАШТУВАННЯ ГЛЮКОМЕТРА


- 1 **Слот для тест-смужки**
Для включення приладу вставте в слот тест-смужку.
- 2 **Ежектор тест-смужки**
При натисканні на кнопку тест-смужка викидається з приладу.
- 3 **Дисплей (Екран)**
- 4 **Головна кнопка**
Вхід в пам'ять приладу і включення універсального звукового сигналу.
- 5 **Порт передачі даних / USB**
- 6 **Кнопка налаштування (SET)**
Знаходиться під кришкою відсіку для батареї.
Введення і підтвердження налаштувань приладу.
- 7 **Відсік для батареї.**
- 8 **Індикатор подачі тест-смужки (підсвічування).**

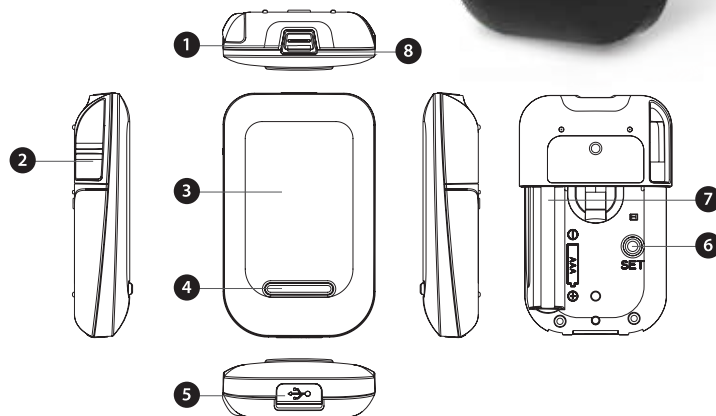

SET

Вхід в режим налаштування

Відкрийте кришку відсіку батарей.
Встановіть батарейку.
Натисніть [SET].
Увімкнеться дисплей.

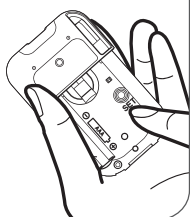

Налаштування дати

Під час блимання номера року, натискайте головну кнопку до отримання потрібного номеру року.
Натисніть кнопку SET.
Повторіть операції для вибору місяця і дати.

AM/PM

Налаштування формату часу

Натисніть головну кнопку для вибору необхідного формату часу - 12 або 24 години. Натисніть кнопку SET.



Налаштування часу

Під час блимання годинника, натискайте головну кнопку, поки не отримаєте потрібний час. Натисніть кнопку SET.
Під час блимання хвилин натискайте головну кнопку, поки не отримаєте потрібні хвилини.
Натисніть кнопку SET.



Очищення пам'яті

На дисплеї повинна бути позначка "DEL" та мигаючий символ .
Натисніть головну кнопку та виберіть "NO" для збереження результатів в пам'яті, потім натисніть кнопку SET для пропуску.
Для видалення всіх результатів натисніть головну кнопку, на дисплеї з'явиться індикація "YES" і , натисніть кнопку SET для очищення пам'яті.



Налаштування Універсального Звукового Сигналу

Натисніть головну кнопку та виберіть "ON". На екрані з'явиться символ "UE", натисніть головну кнопку та виберіть "ON", щоб задати увімкнення Універсального Звукового Сигналу.
Натисніть головну кнопку та виберіть "OFF", щоб задати вимкнення Універсального Звукового Сигналу.



Налаштування сигналу будильника

Ви можете встановити будь-який або всі сигнали будильника (1-4).
На дисплеї повинна бути позначка "ON" (вкл.) або "OFF" (викл.) та значок .
Якщо ви не хочете ставити сигнал, натисніть кнопку SET, щоб пропустити цей крок.
Якщо ви хочете відключити сигнал, знайдіть номер сигналу, натиснувши кнопку SET в режимі настройки, натисніть головну кнопку для перемикання з "ON" на "OFF".