

Країна виробник: Швейцарія
Завод виробник: Тайвань
Гарантія 2 роки. Безкоштовне сервісне обслуговування 10 років




gamma-farm.com.ua

Використовувати тільки
з тест-смужками
GAMMA DM




ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ (Універсальний Звуковий Сигнал)

- 1 Вставте тест-смужку у вимкнений прилад.**
Дочекайтеся, доки на дисплеї приладу з'явиться символ тест-смужки "⏏" та краплі крові "💧".

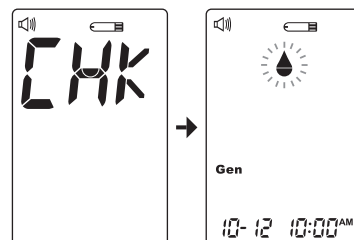

- 2 Нанесіть зразок крові на тест-смужку.**
Доторкніться крапелькою крові до входу в забірний отвір на тест-смужці.
Якщо кількість забраної крові достатня, контрольне віконце буде повністю заповнено.
НЕ прибирайте палець, поки не почуєте сигнал зумера.

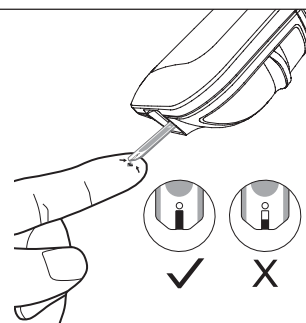

- 3 Через 5 секунд на екрані з'явиться результат**
(Наприклад 5.6 ммоль / л)
Повідомлення результату тесту за допомогою Універсального Звукового Сигналу

Результати розбиваються на окремі розряди, і кожний розряд позначається відповідним числом сигналів біпера.

Результат повідомляється послідовно три рази, і кожний раз йому передують два коротких звукових сигнали.

Тобто, Ви почуєте: 2 коротких "біп" – результати тестування – 2 коротких "біп" – результати тестування – 2 коротких "біп" – результати тестування.

У випадку пристроїв із індикацією у ммоль/л, десятки завжди повідомляються, навіть якщо результат менший за 10. Десяткова крапка позначається одним коротким "біп".

Приклад:

6.0 ммоль/л повідомляється так: 1 довгий "біп"(0) – 1 одиночна пауза – 6 одиночних "біп" (6) – 1 одиночна пауза – 1 короткий "біп" (.) – 1 одиночна пауза – 1 довгий "біп" (0).



- 4 Вийміть використану тест-смужку**
Для видалення використаної тест-смужки просто натисніть кнопку ежектору тест-смужки вгору.
Після видалення тест-смужки результат автоматично зберігається в пам'яті і глюкометр відключається.

